

**Waarvoor wordt Formule W Likdoornpen gebruikt en hoe werkt het?**

Likdoorns ontstaan door een langdurige plaatselijke wrijving en druk. Het ontstane eelt wordt naar binnen gedrukt en geeft pijnklachten.

Formule W Likdoornpen is een medisch hulpmiddel voor de behandeling en het verwijderen van likdoorns door middel van een penapplicator met een sterk geconcentreerde gel. Deze gel (met Trichloorazijnzuur) stimuleert de celvernieuwing, waardoor de huid vervelt. Op die manier zal nieuwe, gezonde huid gevormd worden en zal de likdoorn krimpen en verdwijnen.

**Wanneer mag Formule W Likdoornpen niet worden gebruikt?**

Formule W Likdoornpen mag **niet** gebruikt worden op:

- open wondjes, geïrriteerde of geïnfecteerde huid
- bij gebleken overgevoeligheid voor Trichloorazijnzuur
- pigmentvlekken
- kinderen jonger dan 4 jaar

Formule W Likdoornpen is uitsluitend geschikt voor uitwendig gebruik.

**Wanneer moet u een (huis)arts raadplegen?**

Het is verstandig in de volgende gevallen een (huis)arts te raadplegen:

- Als de likdoorn binnen 14 dagen niet verbetert.
- Indien er een bijwerking optreedt welke u als ernstig ervaart.
- Wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft.
- Wanneer u diabetes heeft.

**Waar moet u speciaal op letten bij gebruik van Formule W Likdoornpen?**

- Gebruik een kleine hoeveelheid gel (1 druppel). Te grote hoeveelheden kunnen irritaties veroorzaken.
  - De beschreven rustdagen in het behandelingschema zijn essentieel voor het doorwerken van de werkzame stof en het herstel van de huid.
  - **LET OP:** Formule W Likdoornpen is pijnloos in gebruik, waardoor u de werking niet zult voelen. Breng de gel met behulp van de pen nauwkeurig op de likdoorn aan om onnodige beschadiging te voorkomen. U kunt dit vermijden door vooraf vaseline aan te brengen op de omliggende huid.
  - Vermijd contact met ogen of slijmvliezen.
  - Gebruik de Formule W Likdoornpen niet op wratten. Voor wratten zijn gespecialiseerde producten ontwikkeld door Formule W met een aangepast concentraat.
- Zie onze website: [www.formulew.nl](http://www.formulew.nl)

**Welke bijwerking heeft Formule W Likdoornpen?**

Met de pen kunt u Formule W nauwkeurig aanbrengen waardoor de kans dat de gel op de gave huid terecht komt verwaarloosbaar is.

**LET OP:** Mocht Formule W Likdoornpen toch met de gave huid in aanraking komen, dan dient u de gel direct af te vegen en de plek met water en zeep af te wassen. Bij langdurig contact met de gave huid wordt deze huid aangetast. Dit kunt u vermijden door vaseline aan te brengen op de huid rondom de likdoorn(s). In geval er bijwerkingen optreden die u als ernstig ervaart of die niet in de gebruiksaanwijzing worden genoemd, raadpleeg dan uw (huis)arts.

**Waar moet u op letten als u ook geneesmiddelen gebruikt?**

Voor zover bekend zijn er geen wisselwerkingen met geneesmiddelen.

**Hoe lang en op welke wijze kunt u Formule W Likdoornpen bewaren?**

Formule W Likdoornpen bewaart u op kamertemperatuur (15-25°C). Sluit de pen na gebruik goed af om uitdroging te voorkomen. De uiterste gebruiksdatum staat aangegeven op de verpakking en op de Formule W Likdoornpen. Buiten bereik van kinderen bewaren.

**Gebruiksaanwijzing**Bij het eerste gebruik:

draai de onderzijde van de applicator totdat de gel zichtbaar is.

Bij de volgende behandelingen:

voorzichtig draaien totdat een kleine hoeveelheid van de gel zichtbaar is.

**Behandelingschema**

1. Vijf de likdoorn licht op met één van de bijgeleverde vijltjes.
2. Gebruik de Formule W Likdoornpen 1 keer per dag gedurende 4 dagen. Breng de gel zorgvuldig aan op de likdoorn(s) zonder de omliggende huid te beschadigen en laat deze opdrogen. Een kleine hoeveelheid gel is afdoende, 1 druppel werkt snel en effectief. **TIP:** Breng eventueel vooraf vaseline aan op de omliggende huid om beschadiging te voorkomen.
3. Staak de behandeling vervolgens gedurende 4 dagen. Gedurende deze dagen zal de huid vervellen, de huidlaagjes van de likdoorn(s) laten los, en huidherstel wordt gestimuleerd. Een eenmalige behandeling werkt effectief voor kleine likdoorns of voor likdoorns die net zijn ontstaan.
4. Breng een anti-drukkring aan, met het gat precies boven de aangestipte likdoorn.
5. Indien de likdoorn na de eerste behandelingsperiode van 4 dagen nog niet (geheel) verdwenen is, herhaal dan de behandeling zoals genoemd in punt 1 tot en met 4 van het behandelingschema. De rustdagen zijn van essentieel belang voor de doorwerking van de werkzame stof en het herstel van de huid.
6. Dit behandelingschema kan totaal 4 keer toegepast worden.

Als na 4 behandelingen de likdoorn nog niet verdwenen is, vraag dan uw (huis)arts om advies.

**TIP:** Bij hardnekkige eelt is de Formule W Likdoornpen ook toe te passen. Breng de gel aan op het eelt en spoel na 15 minuten goed af. Herhaal de behandeling indien gewenst met inachtneming van 1 rustdag na de dag van de behandeling. Behandel hardnekkig eelt maximaal 4 keer met na iedere behandelingsdag 1 rustdag.

Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst herzien in april 2012.

Voor meer informatie over behandeling van likdoorns ga naar [www.formulew.nl](http://www.formulew.nl)

**Fabrikant:**

Medical Brands  
Veembroederhof 96  
1019 HC Amsterdam

**Distributeur:**

Remark Pharma  
Industrieweg 24  
7979 AK Meppel